


GUIA RÁPIDO | TR COVID-19 Ag - Bio-Manguinhos

DE PROCEDIMENTOS DE COLETA DA AMOSTRA, EXECUÇÃO DO ENSAIO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Antes de iniciar o teste, confira o nome do kit com o nome deste Guia Rápido.

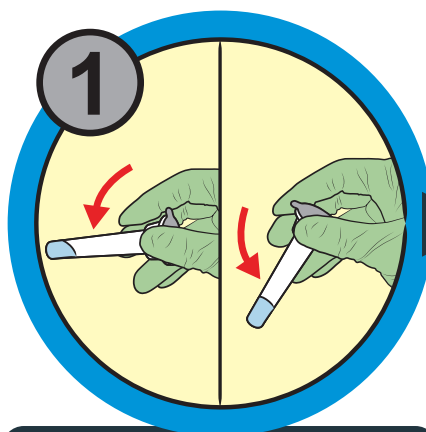


Garantir que a solução esteja no fundo do frasco.




Retirar o lacre do frasco.




Inclinar a cabeça do paciente em um ângulo de 70°, introduzir o swab em uma narina delicadamente, com movimentos rotatórios, margeando o palato, até atingir a resistência da parede posterior da nasofaringe.

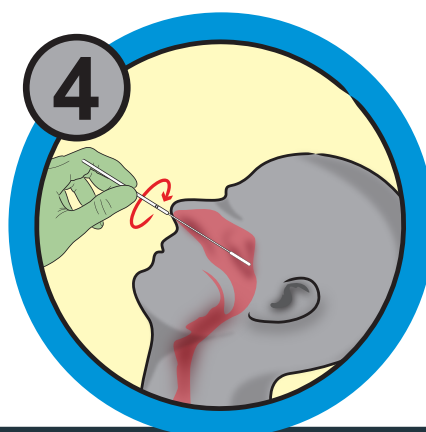

Girar o swab algumas vezes contra a parede da nasofaringe e removê-lo cuidadosamente.

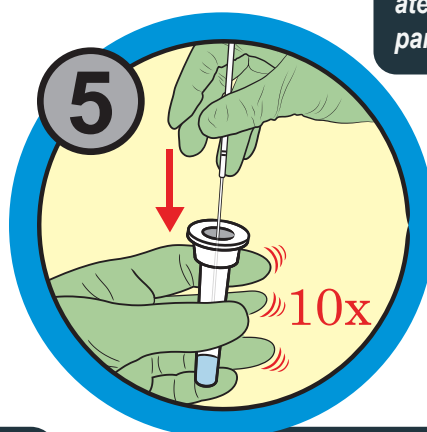

Inserir o swab e agitar o tubo por no mínimo 10 vezes.

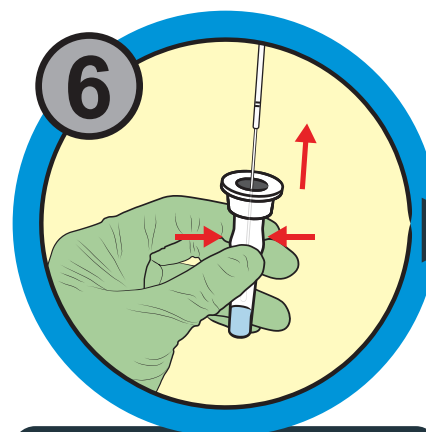


Retirar o swab pressionando-o contra a parede do tubo.



Tampar o tubo com a ponta conta-gotas.



Adicionar 3 gotas na cavidade de amostra.

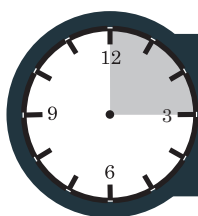

Interpretar em

15 MINUTOS

Iniciar a cronometragem.


Ler o resultado em 15 minutos.

Não interpretar o resultado após 15 minutos.

1-COLETA DA AMOSTRA E EXECUÇÃO DO ENSAIO

GUIA RÁPIDO | **TR COVID-19 Ag** - Bio-Manguinhos

DE PROCEDIMENTOS DE COLETA DA AMOSTRA, EXECUÇÃO DO ENSAIO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

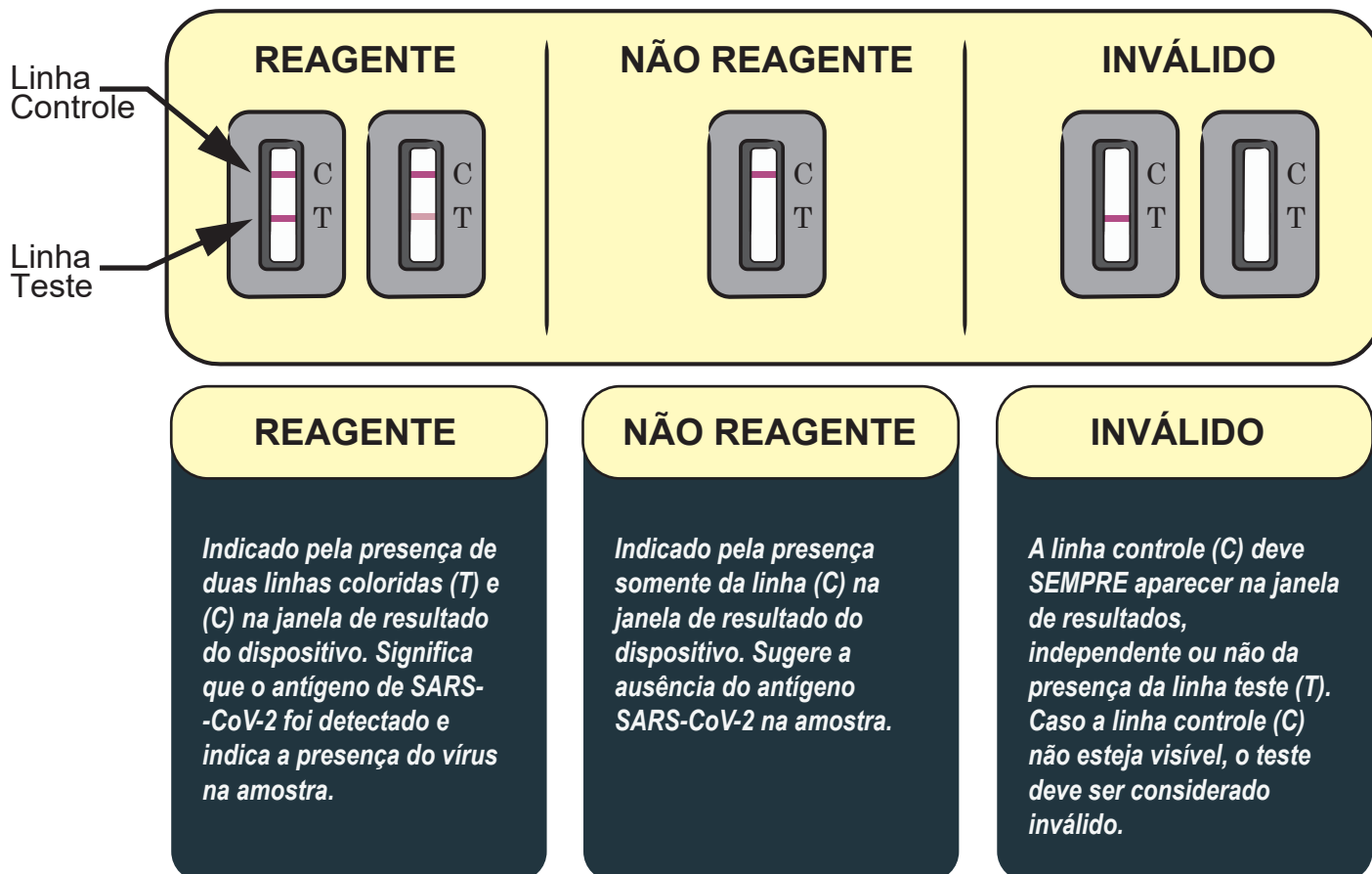

Em caso de dúvidas na interpretação do teste ou problemas com os componentes, por gentileza, separar o suporte do teste e fazer contato com o SAC de Bio-Manguinhos (08000 210 310 ou sac.reativos@bio.fiocruz.br).

Acesse o QR Code abaixo e assista ao vídeo explicativo.



Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz



Instituto de Tecnologia
em Imunobiológicos
Bio-Manguinhos